

ACAM®5 Produktinfo

Schnellstartsonde INSITU AS 04

Binaurale In-Situ-Messung ganz ohne Schlauch

Hoher Komfort und Präzision durch externes Gehörgangs-Mikrofon

INSITU AS 04, unsere jüngste binaurale Schnellstartsonde für ACAM 5, macht die In-Situ-Messung für Sie und Ihre Kunden jetzt noch einfacher und angenehmer. Ebenso wie ihr Vorgängermodell INSITU AS 03, ist auch INSITU AS 04 extrem klein und leicht, sowie mit der bewährten patentierten Halteschleufe für eine sekunden-schnelle Platzierung ausgestattet.

Zusätzlich bietet Ihnen INSITU AS 04 technische Weiterentwicklungen, die sowohl den Komfort im Handling als auch die Präzision Ihrer Messergebnisse nochmals deutlich erhöhen:


- » Aufgrund des externen Mikrofons, das längenvariabel direkt im Gehörgang platziert werden kann, erfolgt die In-Situ-Messung komplett schlauchfrei.
- » So kann die Sonde noch leichter und schneller im Ohr platziert werden.
- » Auch Schlauchwechsel und Schlauchkalibrierung entfallen komplett.
- » Da der Schall bei der AS 04 nicht mehr über einen Schlauch, sondern unmittelbar über das Gehörgangs-Mikrofon aufgenommen wird, sind die Messungen äußerst zuverlässig und präzise und bieten Ihnen eine wesentlich höhere Ergebnisqualität als herkömmliche In-Situ-Messungen.
- » Typische Messfehler, wie sie bei einem zu



Unsere binauralen Schnellstartsonden mit patentierter Halteschleufe: INSITU AS 04 für die schlauchfreie In-Situ-Messung über Gehörgangs-Mikrofon (in Abb. 1 oben auf Präsentationsständer) und Vorgängermodell INSITU AS 03 (in Abb. 1 unten).



Zeitsparend, komfortabel und äußerst Präzise: Das längenvariable Gehörgangs-Mikrofon mit hygienischer Kunststoffumkapselung und auswechselbarem HF4-Filter der INSITU AS 04.

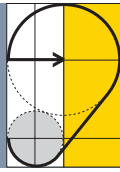

ACAM[®]5 Produktinfo

starkem Abknicken des Schlauches vorkommen können, sind gänzlich ausgeschlossen.

- » Für die leichte Reinigung und eine einwandfrei hygienische Anwendung, ist das Mikrofon mit einer Kunststoffumkapselung sowie einem auswechselbaren HF4-Filter versehen.
- » Das Kabel ist mit einer speziellen Teflonoberfläche beschichtet und dadurch besonders robust und langlebig.

Vielseitig einsetzbar – monaural und binaural

Die Schnellstartsonde INSITU AS 04 kann für sämtliche Versorgungen, Messungen und Überprüfungen bis zu einem Eingangspegel von 110 dB zum Einsatz kommen. In Verbindung mit dem bilateralen ACAM 5 Messwandler E02-2 selbstverständlich auch für die binaurale In-Situ-Messung.

Wem die monaurale Messung genügt, kann über einen entsprechenden Adapter auch ohne den ACAM 5 Messwandler mit der INSITU AS 04 arbeiten und ihre technischen Vorzüge nutzen.

Die Sonde ist mit einer Kennzeichnung für links, rechts oder auch neutral lieferbar.

Automatische Sondenerkennung

Je nach Einsatz oder den persönlichen Vorlieben Ihrer Mitarbeiter, können Sie in Ihrem Geschäft auch beide Schnellstartsonden, AS 03 und AS 04, problemlos und ohne den geringsten Aufwand nutzen: Über eine integrierte Kennung in den Steckern wird bei einem Wechsel der In-Situ-Sonde automatisch die jeweils korrekte Sondenkalibrierung für ACAM 5 geladen.

Mehr Infos?

Weitere Informationen zum Acousticon Anpass-System ACAM 5 sowie unserem Messtechnik-Equipment und Zubehör erhalten Sie direkt bei Acousticon sowie unter: **www.acousticon.de**